

Тренажер Володя №9 для отработки реанимации (с вариациями поставки)



Артикулы: J202R

Манекен Володя предназначен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, включая дефибрилляцию. Он соответствует всем требованиям установленным в Паспорте ОСКЭ «Базовая сердечно-лёгочная реанимация» для изучения СЛР.

Отчет о выполненной практике реанимации можно получить через специальное программное обеспечение на ноутбуке. Программа отображает результаты на графиках и озвучивает действия. Важно отметить, что ПО русифицировано и подходит для любого уровня подготовки пользователя. Управление манекеном осуществляется по Wi-Fi или через USB-кабель в реальном времени.

Манекен поставляется с ноутбуком или без, также возможна комплектация с дефибриллятором

Программа идёт в комплекте с тренажером, если у вас нет ноутбука, вы можете приобрести его у нас с уже предустановленной программой

Показатели, фиксируемые программой

- Глубина и частота компрессии;
- Положение рук;
- Соблюдение алгоритма действий реанимации;
- Объем ИВЛ (избыточный/недостаточный) и др.

Режимы работы тренажера

- **Экзаменационный режим:** Позволяет отслеживать до 27 параметров СЛР, сохранять и распечатывать результаты тренировок или экзаменов. Идеален для контроля успеваемости специалистов.
- **Учебный режим:** Предназначен для изучения и практики алгоритма СЛР. Показатели контролируются и настраиваются, позволяя создавать индивидуальные программы тренировок.
- **Режим «Клиника»:** С виртуальным мониторингом поможет лучше отслеживать состояние пациента и эффективно выполнять необходимые манипуляции.
- **Самостоятельная работа:** Позволяет отрабатывать навыки СЛР с возможностью настройки параметров, создания индивидуальных тренировочных программ и звукового сопровождения на русском языке. Подходит для самостоятельной практики.



Манекен можно использовать как с полным ростом, так и в виде торса (конечности снимаются, вместо них можно поставить заглушки, которые идут в комплекте). Володя работает от сети 220В и имеет возможность использования в полевых условиях из-за встроенного аккумулятора.

Тренажер Володя имеет высокую степень реалистичности: подвижные конечности, имитация пульса, зрачки с реакцией на свет, голова с имитацией кожи, экскурсия грудной клетки, а также анатомические ориентиры напоминающие тело человека. Тренажер допускает использование различных дефибрилляторов и настройку разрядов. Возможна практика искусственной вентиляции легких и тройной прием Сафара.

Володя №9 поставляется с [автоматическим наружным дефибриллятором](#): приобретение комплекта обойдется Вам выгоднее, чем покупка аксессуара отдельно! Тренажер-дефибриллятор позволяет работать в 10-ти режимах с отображением последовательности дефибрилляции, а также с голосовыми комментариями на русском языке. Кроме того, манекен можно использовать с настоящим дефибриллятором. Также тренажер отслеживает соблюдение алгоритма первой медицинской помощи и позволяет настраивать сценарии реанимации для различных условий. Управление оборудованием осуществляется через Wi-Fi или USB-кабель.

Технические требования к ноутбуку для работы ПО

- Процессор: Intel Pentium Silver N5000
- Оперативная память: 4Гб
- Место на жестком диске: 5Гб
- Видеокарта: 1024 Мб
- Минимальное разрешение: 1920×1080
- USB 2.0
- WIFI 802.11b/g/n ETHERNET
- Операционная система: Windс



Функции	Модель тренажера Володя						
	Володя	Володя №1	Володя №4	Володя №7	Володя №8	Володя №9	Володя №10
Программа в комплекте	—	+	+	—	+	+	+
Регистрация показателей	+	+	+	+	+	+	+
Печать показателей	+	+	+	+	+	+	+
Возможность подключения ноутбука	—	+	+	—	+	+	+
Наличие контроллера	+	—	—	+	—	—	—
Превращение в торс	—	—	—	+	+	+	+
Сгибаемые голова, руки и ноги	+	+	+	+	+	+	+
Наличие пульса	—	+	+	+	+	+	+
Реакция зрачков на свет	+	+	+	+	+	+	+
Режим обучения	—	+	+	+	22 параметра	27 параметров	+
Режим экзамена	+	+	+	+	22 параметра	27 параметров	+
Конкурсный режим	—	—	—	—	—	—	+
Отслеживание алгоритма оказания помощи	+	—	—	—	—	—	—
Наличие сценариев реанимации (тучного человека, с одним/двумя спасателями и т.д.)	+	—	—	—	—	—	—
Настраиваемые параметры СЛР	+	+	+	—	—	—	—
Сменная упругость грудной клетки	—	—	—	—	+	+	—
Модуль головы для интубации	—	—	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Съемные модули волос и торса другого пола	—	—	—	Опция	Опция	Опция	Опция
Сменные легкие	—	—	—	Опция	Опция	Опция	Опция
Лицо-маска	—	Опция	—	—	—	—	—

Функции	Модель тренажера Володя						
	<u>Володя</u>	Володя №1	<u>Володя №4</u>	<u>Володя №7</u>	<u>Володя№8</u>	<u>Володя№9</u>	<u>Володя №10</u>
<u>Работа с дефибриллятором</u>	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
<u>Модуль для отработки в/в, в/м, подкожных инъекций</u>	—	—	—	Опция	Опция	Опция	Опция

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru